

Y-CONNECTOR SET TYPE **OKAY** II





Fue diseñada en colaboración con el cardiólogo intervencionista Dr. **Osamu Kato**.


O samu K ato A kira Y amamoto

Akira Yamamoto fue el fundador de Goodman Co.

Partes y funciones

TORNILLO

Girar para abrir y cerrar la válvula para sujetar.

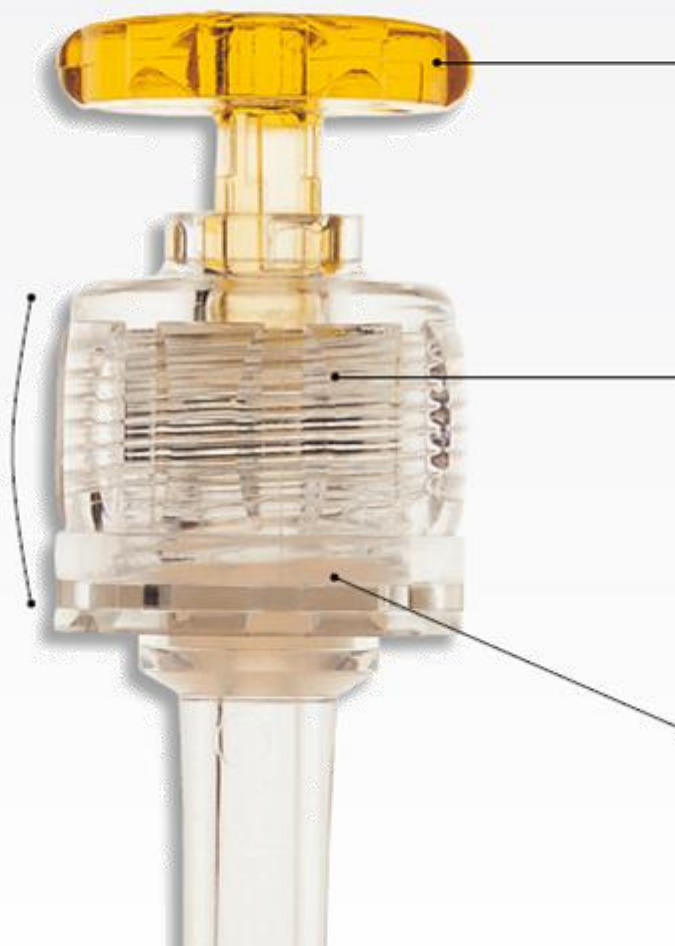

PIEZA

Abre y cierra la válvula hemostática.

VÁLVULA HEMOSTÁTICA

Válvula para minimizar la pérdida de sangre durante el procedimiento.

VÁLVULA PARA FIJAR

Válvula para sujetar los dispositivos y evitar pérdida de presión.

Hemostatic Valve



Una vez que la válvula hemostática ha sido abierta, un **cuarto de vuelta** en el sentido de las manecillas del reloj mantiene la válvula en posición abierta.

Principales competidores



OKAY II
Goodman



Copilot
Abbott



Guardian
Vascular Solutions



Gateway
Boston Scientific



Y connector
Terumo



MBA
Sheen man



Honor
Sheen man

Comparación del Lumen interno



OKAY II
Goodman



Copilot
Abbott



Guardian
Vascular
Solution



Gateway
Boston
Scientific



Y connector
Terumo



MBA
Sheen man



Honor
Sheen man

	OKAY II Goodman	Copilot Abbott	Guardian Vascular Solution	Gateway Boston Scientific	Y connector Terumo	MBA Sheen man	Honor Sheen man
Length	90mm	77mm	93mm	75mm	62mm	76mm	78mm
Hemostatic valve	○	○	○	×	×	○	○
Fixed valve	○	○	○	○	○	○	×
I.D. (mm)	3.33	2.44	2.7	2.2	2.5	2.6	2.4
Compatible (FR)	10.0	7.0	8.1	6.9	7.6	7.8	7.5

Comparación del Lumen interno

10Fr



> Rotablator



> KBT



Resultados de las pruebas



OKAY II
Goodman



Copilot
Abbott



Guardian
Vascular Solution

Operatividad mientras la
válvula esté cerrada

Suave

Difícil

Difícil

Operación



Puede fijarse en
posición abierta.



NO puede fijarse en
posición abierta.



NO puede fijarse en
posición abierta.

- > OKAY II requiere a menor cantidad de fuerza para abrirse.
- > OKAY II provee la manipulación más suave de los dispositivos con la válvula hemostática cerrada.

Accesorios



- > Dispositivo de torque compatible con guías: 0.010 – 0.018"
- > Resistencia a la presión con la válvula hemostática cerrada ≤ 200 psi

Y-CONNECTOR SET TYPE **OKAY** II

